

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CONECTORES

RWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA
AV. DO TABOÃO 3417 - VILA SANTA LUZIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - CEP 09.656-000
TELEFONE: +55 11 3465-5400 - EMAIL: RWR@RWR.COM.BR
CNPJ: 08.441.496.0001-40

Edição do manual: 10-2022 – Código: 70.0930 – Rev.: 02

A RWR reserva-se o direito a modificações no equipamento sem aviso prévio.

Introdução

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto desenvolvido através dos mais recentes conceitos de alta tecnologia disponíveis no mercado. Este equipamento foi projetado seguindo rigorosos padrões de qualidade para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança ao usuário.

Produto

Nome Comercial: Conectores RWR

Modelos Comerciais: Conectores

Marca: RWR

Fabricante

RWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA

AV. DO TABOÃO 3417 - VILA SANTA LUZIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

CEP 09.656-000 - TELEFONE: +55 11 3465-5400 - EMAIL: RWR@RWR.COM.BR

CNPJ: 08.441.496.0001-40

REGISTRO ANVISA: 80412230001

REGISTRO ANVISA: 80412230029

REGISTRO ANVISA: 80412230030

- Responsável Técnico: Eduardo Ricardo Rodrigues – CREA 5062083030
- Prazo de Validade: Indeterminado.

ATENÇÃO



Leia atentamente todas as informações contidas nestas Instruções de Uso antes de começar a utilizar o equipamento.

Conteúdo

1. Apresentação do Produto	5
2. Simbologia	5
3. Descrição do Produto.....	5
3.1. Princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto aplicados para seu funcionamento e sua ação	5
3.2. Etiquetas de identificação.....	5
3.3. Itens opcionais, materiais de consumo e materiais de apoio.....	5
3.3.1. Itens opcionais	5
3.3.2. Materiais de consumo	5
3.3.3. Materiais de apoio	5
3.4. Instalação e conexão com outros produtos.....	5
3.5. Tabela comparativa entre os modelos	6/7
4. Advertências e precauções.....	8
5. Especificações técnicas	8
5.1. Ambiente de armazenamento e transporte	8
5.2. Ambiente de trabalho.....	8
5.3. Precauções de segurança.....	8
6. Instruções para uso correto do produto	8
6.1. Operação.....	8
6.2. Posicionamento	8
7. Condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto	9
7.1. Armazenamento	9
7.2. Transporte.....	9
7.3. Acondicionamento.....	9
7.4. Conservação.....	10
8. Advertências e/ou precauções a serem adotadas.....	10
8.1. Advertências e/ou precauções com os usuários	10
8.2. Advertências e/ou precauções sobre perigo de explosão.....	10

8.3	Advertências e/ou precauções durante a manutenção do equipamento.....	10
8.4	Advertências e/ou precauções durante a limpeza	10
9	Desempenho do produto	10
9.1	Indicação e finalidade de uso do produto	10
9.2	Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis.....	10
9.3	Segurança e eficácia do produto	10
10	Procedimentos para reutilização do produto	11
10.1	Limpeza	11
10.2	Desinfecção.....	11
10.3	Acondicionamento.....	11
11	Precauções em caso de alteração do funcionamento do produto	12
12	Sensibilidade a condições ambientais nas situações normais de uso	12
13	Precauções em caso de inutilização do produto	12
14	Termo de Garantia	12
15	Termo de Responsabilidade	12
16	Procedimento de Finalização.....	12
17	Assistência técnica.....	12
18	Disposição do equipamento (Após vida útil).....	13
19	Partes do equipamento que não podem passar por manutenção durante uso com paciente	13
20	Responsabilidade.....	13
21	Documentação Técnica	13
22	Declaração de Biocompatibilidade.....	13
23	Declaração de Vida Útil	13
24	Solução de problemas	13
25	Fabricante	13

1. Apresentação do Produto

Os **Conectores** estão disponíveis em vários modelos para atender as mais diversas necessidades dos profissionais da área médica de acordo com suas exigências.

A seguir são apresentadas todas as informações necessárias para a correta utilização do produto.

2. Simbologia

	Símbolo Geral de Advertência
---	------------------------------

3. Descrição do Produto

Os **Conectores** são acessórios para uso médico- hospitalar, projetados para aliar tecnologia e facilidade de manuseio. Para uso em geral, desempenham basicamente a mesma função de condutores de gases. Produtos condutores de gases, são utilizados para condução de diversos tipos de gases em várias situações médico-hospitalares.

3.1. Princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto aplicados para seu funcionamento e sua ação

Os conectores são indicados para uso na conexão de mangueiras, tubos e/ou traqueias empregados em circuitos respiratórios ou de aplicação de gás com a finalidade de evitar a perda do gás durante o procedimento médico hospitalar, além de proporcionar agilidade, flexibilidade e facilidade na substituição destes componentes.

3.2. Etiquetas de identificação

Etiqueta de identificação do produto

A identificação do produto está em forma de código de barra na embalagem.

3.3. Itens opcionais, materiais de consumo e materiais de apoio

3.3.1. Itens opcionais

Não aplicável ao produto.

3.3.2. Materiais de consumo

Não aplicável ao produto.

3.3.3. Materiais de apoio

Ver item 7.1 deste manual.

3.4. Instalação e conexão com outros produtos

O equipamento possui instalação ou conexão com outros produtos desde que estejam de acordo com as normas ABNT NBR ISO 5356-1:2016.

Atenção!!!

A utilização de peças, acessórios ou materiais não especificados nestas Instruções de Uso é de inteira responsabilidade do proprietário podendo até comprometer o período de garantia determinado para o produto.


3.5 Tabela comparativa entre os modelos

Conectores Reto




A	B	C	D	Descrição	Polisulfona	Policarbonato
15mm	22mm	-	22mm	Conector Reto 22f x 22m x 15f	00.0268	00.0508
-	15mm	22mm	15mm	Conector Reto 22 m x 15f x 15m	00.0308	00.0937
-	Ø7,5mm	15mm	-	Conector Reto 15 m x Bico de Ø 7,5 mm	00.0309	00.0938
-	Ø13mm	-	22mm	Conector Reto 22 f x Bico de Ø 13 mm	00.0310	00.0939
-	Ø13mm	15mm	-	Conector Reto 15 m x Bico de Ø 13 mm	00.0311	00.0510
-	Ø13mm	-	15mm	Conector Reto 15 f x Bico de Ø 13 mm	00.0312	00.0722
15mm	22mm	22mm	15mm	Conector Reto 22m x 22m x 15f x 15f	00.0313	00.0597
-	Ø11,5mm	22mm	15mm	Conector reto 22m x 15f x bico de Ø 11,5mm	00.0358	00.0940
-	Ø11,5mm	15mm	-	Conector Reto 15 m x Bico de Ø 11,5mm	00.0359	00.0941
-	Ø11,5mm	-	22mm	Conector Reto 22f x bico de Ø 11,5mm	00.0360	00.0942

Conectores cotovelo com saída lateral

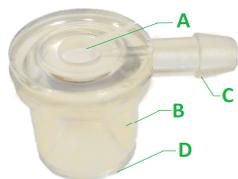


A	B	C	D	Descrição	Polisulfona	Policarbonato
8mm	22mm	9,5mm	-	Conector em Cotovelo p/ Máscara Transparente c/ Furo	00.0945	00.0248
-	22mm	9,5mm	-	Conector em Cotovelo p/ Máscara Transparente s/ Furo	00.0946	00.0366

Conectores cotovelo

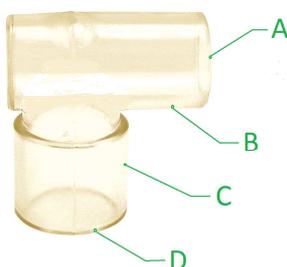


A	B	C	D	Descrição	Polisulfona	Policarbonato
15mm	22mm	-	22mm	Conector em Cotovelo 22 f x 22 m x 15 f	00.0030	00.0511
-	15mm	22mm	15mm	Conector em Cotovelo 22 m x 15 f x 15 m	00.0122	00.0943
15mm	22mm	22mm	15mm	Conector em Cotovelo 22 m x 15 f x 22 m x 15 f	00.0274	00.0509

Conectores em "T"

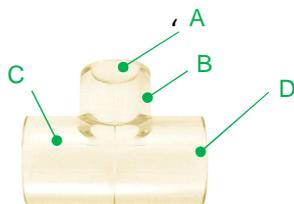

A	B	C	D	Descrição	Polisulfona	Policarbonato
15mm	22mm	-	22mm	Conector em T 22f x 22f x 22m x 15f	00.0205	00.0598

Conectores com saída lateral

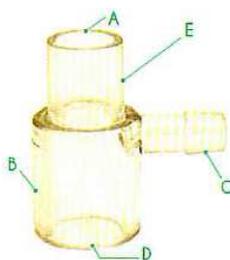

A	B	C	D	E	Descrição	Polisulfona	Policarbonato
15mm	-	Ø6mm	22mm	22mm	Conector Reto 22m x 22f c/ Entrada Lateral Ø 6 / 8 mm	00.0367	00.0947
-	22mm	Ø6mm	15mm	15mm	Conector T de Ayres	00.0270	00.0948

Dreno para circuito respiratório



Descrição	Polisulfona	Policarbonato
Dreno de Rosca para circuito respiratório	00.0192	00.0958
Dreno de Encaixe p/ Circuito Respiratório	00.0652	00.0957

Ypsilon



Descrição	Polisulfona	Policarbonato
Ypsilon Adulto	00.0266	00.0953
Ypsilon Infantil	00.0328	00.0954



4. Advertências e precauções

Certifique-se de ler e compreender completamente o manual antes de usar este produto. Mantenha este manual para fácil acesso.

ATENÇÃO: Equipamento pretendido somente para uso por profissionais.

- Não deixar o equipamento exposto diretamente à luz solar.
- Não armazenar o equipamento desprovido de proteção contra condições ambientais (chuva ou poeira excessiva).
- O fabricante se isenta de responsabilidade se contrariadas as indicações desse manual.
- Não use o produto em local inflamável, quente, com ambiente empoeirado, atenção para mantê-lo limpo e seco; para evitar a danificação pelo ambiente (umidade, poeirento, líquido, sob o sol e assim por diante).
- O uso do equipamento requer pleno entendimento e observação estrita de todas as seções destas instruções de uso. O equipamento somente deve ser usado para a finalidade especificada em “Uso previsto”.
- Não pode ser usado em áreas com perigo de explosão.
- Recomenda que o equipamento seja somente utilizado junto aos acessórios e componentes fornecidos pelo fabricante.

5. Especificações técnicas

Dimensões do equipamento (A x C x L)	Ver tabela acima
Peso líquido	Conforme modelo
Peso bruto	Conforme modelo
Tipo de embalagem	Saco plástico
Dimensões da embalagem	Conforme modelo (C x L x A)

5.1. Ambiente de armazenamento e transporte

- Deve ser armazenado em local limpo e seco;
- Sob Temperatura de 10°C à 40°C;
- Umidade relativa do ar: 10% à 95%;
- Deve ser protegido de luz direta do Sol e vapores químicos;
- Deve ser manuseado com cuidado

5.2. Ambiente de trabalho

- Temperatura ambiente: 10°C à 40°C
- Umidade relativa: 10% à 95%
- Pressão atmosférica: 375 à 795hPa

5.3. Precauções de segurança

A seguir, estão algumas medidas de segurança que devem ser respeitadas a fim de manter um ambiente de trabalho seguro.

O equipamento deve ser usado em um ambiente fresco, seco e sem poeira.

6. Instruções para uso correto do produto

6.1. Operação

Os **Conectores** deve estar em perfeitas condições de operação.

6.2. Posicionamento

Ver item 7.1 deste manual.

ATENÇÃO!!!

É expressamente desaconselhável a utilização do equipamento por pessoas não capacitadas, sendo que não nos responsabilizamos pelo uso incorreto do mesmo.



ATENÇÃO!!

Leia atentamente as instruções a seguir antes de iniciar a instalação do equipamento pela primeira vez.

7. Condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto

ANTES DA INSTALAÇÃO:

7.1. Armazenamento

- Durante o armazenamento, manter o produto em sua embalagem original (saco plástico) e em local protegido de umidade e calor excessivo.
- Os produtos são armazenados em caixotes plásticos e organizados conforme seus respectivos lotes.

7.2. Transporte

- Durante o transporte, evite quedas e impactos diretamente na embalagem.
- Ao manusear o equipamento fora de sua embalagem original, proceda a partir de sua base.
- Durante o transporte e armazenamento, verifique se as condições ambientais se encontram dentro das faixas especificadas conforme descrito abaixo:

Temperatura ambiente para transporte e armazenamento.....10°C à 40°C

Umidade relativa do ar para transporte e armazenamento.....10% à 95%

Pressão atmosférica não influencia no transporte (Não aplicável).

7.3. Acondicionamento

- Manter o produto em local protegido de umidade e calor excessivo, inclusive da incidência de raios solares sobre o mesmo.
- Durante a acomodação e operação do produto, verificar se as condições ambientais se encontram dentro das faixas especificadas conforme descrito abaixo:

Temperatura ambiente para utilização..... 10°C à 40°C

Umidade relativa do ar para utilização..... 10% à 95%

Pressão atmosférica 375 à 795 mmHg.

NOTA: Se por ventura o produto ficou armazenado em temperaturas próximas às limites descritas acima, aconselhamos que o mesmo seja colocado no local de utilização com antecedência para chegar a uma temperatura ambiente; sob pena de danos ao produto e/ou no seu desempenho.

7.4. Conservação

- Após cada utilização, manter o equipamento limpo e desinfetado.
- Não utilizar solventes orgânicos (thinner) ou produtos que liberem cloro para limpeza o equipamento.
- Manter o equipamento em local limpo e longe de poeira.

8. Advertências e/ou precauções a serem adotadas



8.1. Advertências e/ou precauções com os usuários

- Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoal capacitado e sob a direção de equipe médica qualificada, familiarizada com os riscos e benefícios conhecidos sobre a utilização.

8.2. Advertências e/ou precauções sobre perigo de explosão

- Os conectores não são apropriados para utilização na presença de gases inflamáveis ou outros materiais inflamáveis, tais como alguns tipos de produtos de limpeza.

8.3. Advertências e/ou precauções durante a manutenção do equipamento

- Não tente reparar ou substituir componentes defeituosos ou inoperantes do equipamento por partes semelhantes de outros aparelhos. Somente a RWR e seus distribuidores podem efetuar reparos com peças originais e garantir o perfeito funcionamento do equipamento.
- O equipamento deve ser inspecionado e assistido regularmente por pessoal técnico qualificado. Reparos e trabalhos complexos de manutenção do equipamento devem ser realizados por especialistas da RWR. Caso contrário, pode ocorrer falha no equipamento e lesões no paciente.
- A RWR recomenda um contrato de serviços com sua área de Assistência Técnica e que todos os reparos sejam realizados pelos seus técnicos especializados. Para a manutenção, a RWR recomenda o uso de peças de reposição originais RWR.

8.4. Advertências e/ou precauções durante a limpeza

- Não utilizar equipamentos de limpeza por alta pressão ou por vapor.

9. Desempenho do produto

9.1. Indicação e finalidade de uso do produto

Indicação:

Os conectores são indicados para uso na conexão de mangueiras, tubos e/ou traqueias empregados em circuitos respiratórios ou de aplicação de gás.

Finalidade: Evitar a perda do gás durante o procedimento médico hospitalar, além de proporcionar agilidade, flexibilidade e facilidade na substituição destes componentes.

9.2. Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis

Não aplicável a este produto.

9.3. Segurança e eficácia do produto

- Os **Conectores** foram projetados e desenvolvidos com materiais não tóxicos e obedecendo aos mais rigorosos

padrões técnicos de qualidade para oferecer total segurança e funcionalidade ao usuário.

- Se utilizada conforme as instruções descritas nesse manual, os **Conectores** não causará nenhum tipo de problema e não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais.

10. Procedimentos para reutilização do produto

10.1. Limpeza

- A higienização do equipamento deverá ser realizada periodicamente.

10.2. Desinfecção (Esterilização)

Os Conectores **não** são fornecidos esterilizados, portanto eles devem ser esterilizados antes de seu uso.

A obediência às diretrizes hospitalares sobre higiene é de primordial importância. As instruções dos fornecedores de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, também devem ser seguidas no que tange à aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e etc.

Entretanto, os itens abaixo visam constituir um guia geral:

1. As partes externas poderão ser limpas com um pano limpo, macio e umedecido em solução germicida apropriada, tomando-se cuidado para que nenhum resíduo de produto de limpeza se acumule nas conexões do equipamento.
2. Após a limpeza, seque com um pano limpo, macio e seco.
3. Os componentes que entram em contato com os gases respiratórios deverão ser periodicamente esterilizado com uma solução germicida apropriada ou óxido de etileno.

Nota: Os conectores de policarbonato não devem ser esterilizados em alto clave.

4. Sempre que possível, a esterilização a vapor saturada e seca de água é a mais recomendada. Sem dúvida é o mais conveniente para ser aplicado, por ser o mais eficiente, seguro e conhecido, além de ser o mais estudado.

Siga as instruções dos fabricantes de autoclaves no que tange a temperatura, pressão e tempo.

Observações:

- Utilizando óxido de etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.
- Não utilize óleo, graxa ou qualquer substância baseada em hidrocarbono em nenhuma parte da traqueia

Procedimento para esterilizar os conectores de **polisulfona na autoclave**

- Desmontar as peças conectadas no conector;
- Limpar os conectores individualmente;
- Embalar os conectores e esterilizar separadamente;
- Não colocar os conectores sem embalagem adequada dentro da câmara;
- Não encostar os conectores nas paredes da câmara;

Nota: Não utilizar para limpeza e/ou desinfecção o Fenol (>5%), Cetonas, Formaldeído, Hipoclorito, Hidrocarbonatos Clorados, Hidrocarbonatos Aromáticos, Ácidos Inorgânicos e compostos quaternários da Amônia.

10.3. Acondicionamento

- Manter o equipamento em local protegido de umidade e calor excessivos

11. Precauções em caso de alteração do funcionamento do produto

Caso o conector apresente alguma anormalidade fora do normal, verifique se o problema está relacionado com algum dos problemas mencionados no item **25 Solução de Problemas**. Se mesmo assim não for possível solucionar o problema, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada RWR para análise e realização dos reparos.

12. Sensibilidade a condições ambientais nas situações normais de uso

A Linha de Conectores foram especialmente projetados e desenvolvidos de forma a evitar a sensibilidade a variações de pressão e temperatura. Para isso, o equipamento deverá ser transportado, instalado, manuseado e conservado conforme as instruções contidas neste manual.

13. Precauções em caso de inutilização do produto

A fim de evitar a contaminação ambiental ou o uso indevido do produto quando o mesmo for inutilizado, deverá ser providenciada sua segregação, embalagem, identificação e envio (por conta e risco do cliente) para as dependências da empresa **RWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA** para que esta execute o descarte do produto com segurança.

14. Termo de Garantia

A **RWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA** oferece para este equipamento a garantia contra defeitos de material e/ou fabricação que nele se apresentar no prazo de **90 dias** a partir da data de compra.

Fatores que implicam na perda da garantia:

- 1- Inobservância dos cuidados recomendados neste manual com relação ao transporte, instalação, uso e manutenção.
- 2- Acidente, queda, instalação inadequada ou qualquer outro dano provocado por uso incorreto ou ação de agentes naturais.
- 3- Violação, conserto ou qualquer outra modificação ou alteração executadas no equipamento ou em suas partes por pessoal não autorizado pela RWR.
- 4- Após o vencimento do período de garantia, todos os serviços, peças e despesas serão cobradas conforme norma vigente da empresa.

15. Termo de Responsabilidade

A empresa **RWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA** assume a total responsabilidade técnica e legal pelo produto e que todas as informações aqui prestadas referentes aos produtos **Conectores** contidas nestas Instruções de Uso são verdadeiras.

16. Procedimento de Finalização

Não aplicável.

17. Assistência técnica

Os serviços de Assistência Técnica serão prestados pela fábrica ou agentes credenciados.

Em caso de necessidade contate o Serviço de Assistência Técnica da fábrica.

Telefone: +55 11 3465-5400 - Email: rwr@rwr.com.br

18. Disposição do equipamento (Após vida útil)

 A eliminação deste produto deve obedecer a regulamentação nacional. Por favor, observe a regulamentação aplicável no seu país.

Dentro da Comunidade Europeia, a Diretiva 2002/96 EC (WEEE) exige que a reciclagem ou eliminação de dispositivo eletroeletrônico não agride o meio ambiente.

Por favor, consulte seu representante para informações sobre a eliminação final do produto.

19. Partes do equipamento que não podem passar por manutenção durante uso com paciente

- O equipamento não deverá passar por manutenção durante a utilização.

20. Responsabilidade

A RWR considera-se responsável pelos efeitos sobre a segurança, confiabilidade e desempenho deste produto apenas se:

- As operações de montagem, ampliações, reajustamentos, modificações ou reparações são realizadas por pessoas autorizadas.
- O equipamento é utilizado de acordo com estas instruções de utilização.

21. Documentação Técnica

A RWR se reserva o direito de limitar o fornecimento de esquemas, listas de materiais, desenhos e demais documentos relativos à construção do produto, exclusivamente aos Serviços de Assistência Técnica Autorizada.

NOTA: Quaisquer informações necessárias para a realização de manutenções pelas pessoas autorizadas podem ser requisitadas na empresa RWR.

Para instalação ou conexão com qualquer produto, contate-se antes com o representante da RWR.

22. Declaração de Biocompatibilidade

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade, que o equipamento não possui parte aplicada que entra em contato físico com o PACIENTE.

23. Declaração de Vida Útil

A **RWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA** declara que a vida útil do equipamento é 12 meses.

24. Solução de problemas

<i>Problema</i>	<i>Possível causa</i>	<i>Solução</i>
Trincas.	Limpeza com produto incorreto	Usar somente processo de limpeza e esterilização contido neste manual.

Obs.: Caso o problema não seja solucionado conforme descrito no quadro acima, entre imediatamente em contato com a Assistência Técnica Autorizada RWR.

25. Fabricante

RWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA

AV. DO TABOÃO 3417 - VILA SANTA LUZIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

CEP 09.656-000 - TELEFONE: +55 11 3465-5400 - EMAIL: RWR@RWR.COM.BR

CNPJ: 08.441.496.0001-40