

INTRUÇÕES DE USO

MÁSCARA FACIAL RWR

Nome Técnico: Máscara
Nome Comercial: Máscara Facial RWR

Descrição do produto

Máscara facial destinada ao uso em oxigenoterapia, anestesia e outros. Com formato anatômico as Máscaras se adaptam facilmente a face do paciente. Máscaras reutilizáveis.

Apresentação do produto

Quantidade por embalagem:
Modelo 00.0109 – Máscara facial adulto : 10 unidades p/embalagem
Modelo 00.0421 – máscara facial adulto: 01 unidade p/embalagem

Formas de apresentação comercial do produto: Máscaras Faciais RWR.

Embalagem:

As máscaras são fornecidas embaladas e seladas, de acordo com as quantidades especificadas, em embalagem plástica.

Indicação de Uso/Finalidade

A máscara é utilizada nas atividades relacionadas a gasoterapia e oxigenação em geral, auxiliando na administração dos gases.

Princípio de funcionamento

A máscara se acomoda ao rosto do paciente permitindo a administração de gases.

Modo de Uso do produto

- Remova a máscara da embalagem e verifique se o elástico que prende a máscara à face está colocado;
- Para ajustar a pressão da máscara na face, puxe o elástico pela extremidade.

Composição:


Máscara: Confeccionada em PVC atóxico – 65 shore A
Elástico: Confeccionado em Poliéster

Modelos:

00.0109 – Máscara facial adulta
00.0421 – máscara facial adulto



Especificações Técnicas (Dimensões)

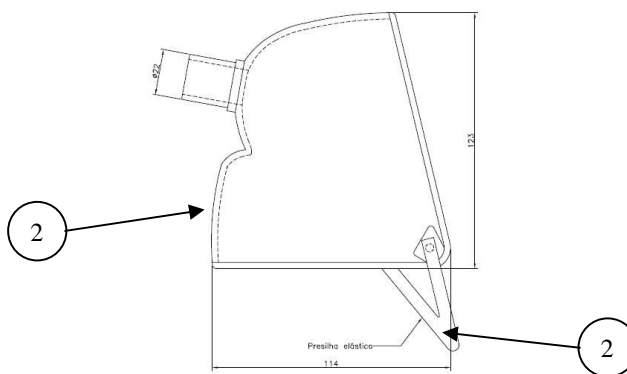

Dimensões:
Altura: 123 mm
Largura: 114 mm
Peso: 95 g

- 1- Máscara de PVC
- 2- Elástico de Poliéster

Limpeza, Desinfecção, Esterilização e Manutenção preventiva

A obediência às diretrizes hospitalares sobre higiene é de primordial importância. As instruções dos fornecedores de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, também devem ser seguidas no que tange à aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e etc.

- As máscaras devem ser limpas antes da desinfecção ou esterilização.
- As partes externas das máscaras devem ser limpas com um pano limpo, macio e umedecido em solução germicida apropriada, tomando-se o cuidado para que os resíduos do produto de limpeza não se acumulem nas conexões das máscaras.
- Após a limpeza, faça a secagem com um pano limpo, macio e seco.
- Para a limpeza e desinfecção pode ser utilizado solução de Glutaraldeído 2% (Cidex) por 40 minutos. O enxágue deve ser executado com água destilada e esterilizada e, secar em ambiente seco.

Esterilização

Utilizar Óxido de etileno:

- Utilizando óxido de etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.
- Não utilize óleo, graxa ou qualquer substância baseada em hidrocarbono em nenhuma parte da máscara.

Obs.: Não esterilizar em autoclave.

Armazenamento e transporte

Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e protegido da luz solar.

Não exponha o produto a temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de degradação das partes.

Temperatura para armazenamento: 0° C a 45°C

Transporte

O produto deve ser transportado em local fresco, seco e protegido da luz solar.

Não exponha o produto a temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de degradação das partes.

Temperatura para transporte: 0° C a 45°C

Manipulação (Manuseio)

Não existem condições especiais de manipulação.

Advertências e Precauções

Advertências

- Não utilize as máscaras sem prévio conhecimento;
- Certifique-se de que o gás a ser utilizado é o indicado pelo médico. Não fume na área onde o equipamento é utilizado;
- Mantenha as máscaras limpas e em bom estado de conservação, para isso utilize um pano limpo e macio umedecido em solução de água e sabão neutro, após a limpeza remova o resíduo com um pano umedecido em água;
- Não utilize álcool, álcool isopropílico, Veja ou produtos similares para limpar as máscaras, estes produtos danificam as peças plásticas;
- Após o uso, proceda a limpeza e desinfecção ou esterilização. Proceda a desinfecção e/ou esterilização antes de reutilizá-la, recomendamos que sejam seguidos os procedimentos de limpeza, desinfecção, esterilização e manutenção preventiva do hospital;
- Não utilize o produto, caso haja fissuras ou rachaduras nas partes plásticas;
- Não tente fazer qualquer reparo nas máscaras. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas autorizadas e com peças originais RWR. Em caso de mau funcionamento, suspenda o uso do produto e entre em contato com a Assistência Técnica RWR;
- Só utilize este produto em perfeitas condições. Qualquer anormalidade contatar imediatamente o serviço de assistência técnica RWR;
- Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a indicada pela RWR;
- A não observância destas precauções será considerado uso indevido do produto.

Precauções

- Siga corretamente as Instruções de Uso e técnicas seguras de procedimentos médicos;
- Não utilize a máscara sem prévio conhecimento ou supervisão adequada;
- Certifique-se se a máscara é adequada e que está conectada corretamente;
- Após o uso, proceda a limpeza e a esterilização antes de reutilizá-la;
- Armazene o produto em local arejado e ao abrigo do calor e umidade;
- As máscaras não são fornecidas esterilizadas, portanto elas devem ser esterilizadas antes de seu uso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao comprador-consumidor do aparelho, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação, apresentado no prazo de 1 ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da RWR em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constante falha em condições normais de uso.

A presente garantia ficará sem efeito se o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, por uso em desacordo com o manual de instruções, ou, ainda, no caso de ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas.

Obriga-se a RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, a prestar os serviços, tanto os gratuitos quanto os remunerados, exclusivamente nas localidades para efetuar consertos. O comprador-consumidor residente em outra localidade será, pois, o único responsável pela despesa de transporte, ida e volta do aparelho à assistência técnica mais próxima.

Se o aparelho for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuamente em vigor até a expiração de seu prazo contando da data da aquisição pelo primeiro comprador-consumidor.

A presente garantia somente será válida se devidamente preenchida pela RWR ou pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho, e não apresentar rasuras ou modificações. É necessário ainda, que este certificado seja apresentado juntamente com a nota fiscal a cada solicitação de prestação de serviços de conserto.

TERMO DE GARANTIA (Deve ser preenchido pelo revendedor no ato da entrega)		
RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda.		
Revendedor	_____	
Modelo e nº de fabricação	_____	
Nota Fiscal nº	_____	
Adquirido por	_____	
End:	Nº	_____
Cidade	Est.	Cep: _____

Fabricado e Distribuído no Brasil por:

RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda
Av. do Taboão 3417 - Vila Santa Luzia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09656-000
Tel.: +55 11 3465-5400
E-mail: rwr@rwr.com.br
CNPJ: 08.441.496.0001-40

Produto não estéril – Esterilizar antes do uso

ARTIGO MÉDICO REUSÁVEL POR UM ÚNICO PACIENTE. QUANDO NÃO ESTIVER MAIS EM CONDIÇÕES DE USO, DESTRUIR E DESCARTAR EM LOCAL PRÓPRIO PARA MATERIAIS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS.

Responsável técnico: Gerson Potonyacz – CREA 5063101610
Prazo de validade: Indeterminado
Registro na ANVISA nº: 80412239004