

INTRUÇÕES DE USO

Micronebulizadores RWR

Nome Técnico: Nebulizador
Nome Comercial: Micronebulizadores RWR

O Micronebulizador RWR foi fabricado para atender as necessidades de nebulização em adultos e crianças, através da atomização de medicamentos, arrastados pelo fluxo gasoso de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal.

Características:

O produto Micronebulizador RWR é compreendido por:

- Unidade micronebulizadora, composta por:
Copo em polipropileno Randon,
Tampa e Injetor em polipropileno Randon;
- Máscara de oxigenação em PVC atóxico;
- Extensão em PVC atóxico
- Capacidade do copo: 6 ml

Composição:

Copo do micronebulizador: Polipropileno Randon;
Tampa do micronebulizador e Injetor: Polipropileno Randon;
Máscara de oxigenação: PVC atóxico
Extensão: PVC atóxico

Embalagem:

Os micronebulizadores RWR são fornecidos embalados e selados individualmente em embalagem plástica contendo conforme descritos abaixo.

Modelos:




00.0044

00.0146

00.0045

00.0147

00.0044 - Micronebulizador p/oxigênio infantil
00.0045 - Micronebulizador p/ar comprimido infantil
00.0146 - Micronebulizador p/oxigênio adulto
00.0147 - Micronebulizador p/ar comprimido adulto

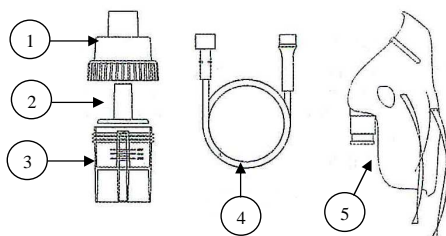

Modelo	Dimensões	
	Largura	Comprimento
Infantil	53,0	97,0
Adulto	75,0	135,0
Dimensões em mm		

Item	Código	Descrição
01	702597	Tampa do micronebulizador
02	702599	Injetor do micronebulizador
03	702598	Copo do micronebulizador
04	302126	Extensão de PVC atóxico para Oxigênio com 2,1m
	302148	Extensão de PVC atóxico para Ar comprimido com 2,1m
05	302129	Máscara facial adulto
	302153	Máscara facial infantil

Indicação, finalidade ou uso a que se destina

O Micronebulizador RWR é indicado para a administração de soluções medicamentosas, através de inalação e tem por finalidade auxiliar a respiração espontânea do paciente em terapias respiratórias.

Precauções e advertências e cuidados especiais

As seguintes advertências e cuidados devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

- O produto não pode ser autoclavado;
- O produto só pode ser usado sob prescrição médica;
- Produto de uso externo;
- Observar atentamente as instruções de uso;
- **Recomenda-se o uso do produto em um único paciente.**

Cuidados Gerais

- Não tente operar o micronebulizador sem prévio conhecimento ou supervisão adequada.
- Certifique-se de que o gás a ser utilizado é o indicado. Não fume na área onde o equipamento é utilizado.
- Nunca use óleo, graxa, hidrocarbonato ou deixe materiais orgânicos similares em contato com o micronebulizador, os equipamentos que utilizam oxigênio não podem ser lubrificados.
- Mantenha o micronebulizador limpo e em bom estado de conservação, para isso utilize um pano limpo e macio umedecido em solução de água e sabão neutro, após a limpeza remova o resíduo com um pano umedecido em água.
- Não utilize álcool, álcool isopropílico, veja, ou produtos similares para limpar o micronebulizador; estes produtos danificam as peças plásticas.
- O micronebulizador não suporta temperaturas acima de 60°C, portanto não o submeta à Autoclave.
- O micronebulizador não deve ser exposto a choques, vibrações ou impactos repentinos.
- Não utilize o equipamento caso haja fissuras ou rachaduras nas partes plásticas.
- Não tente fazer qualquer reparo no micronebulizador. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas autorizadas e com peças originais RWR, em caso de mau funcionamento ou vazamento não solucionável com o aperto das conexões suspenda o uso do produto e entre em contato com a assistência técnica da RWR.
- Só utilize este equipamento em perfeitas condições. Qualquer anormalidade contatar imediatamente o serviço de assistência técnica RWR.
- Não utilize este equipamento para qualquer outra atividade que não a indicada pela RWR.
- A não observância destas precauções e advertências será considerado uso indevido do equipamento.
- Armazene o produto em local arejado e ao abrigo de calor e umidade.

Armazenamento e transporte

Armazenamento:

Durante o armazenamento da seguinte forma:

- Manter em local seco, fresco e ventilado, não o deixe exposto diretamente à luz do sol.
- Temperatura: manter entre 5°C e 40°C
- Umidade relativa do ar: manter entre 30% a 85%

Transporte:

Durante o transporte proceda da seguinte forma:

- Local seco, fresco e ventilado. Não deixe exposto diretamente a luz do sol;
- Temperatura: 5° a 40°C, durante o transporte são admitidas variações de $\pm 5^\circ\text{C}$ na temperatura

Instruções de Uso

Nota: Orientações gerais destinadas para uso por pessoas devidamente qualificadas.

- 1- Colocar a solução prescrita no frasco do nebulizador;
- 2- Rosquear a tampa no frasco do nebulizador, girando no sentido horário;
- 3- Conectar a extensão de alimentação entre a fonte de gás e o nebulizador;
- 4- Conectar a máscara na tampa do nebulizador;
- 5- Abra o fluxo de gás até verificar a névoa de aerossóis na máscara ou até o valor determinado pelo médico;
- 6- Colocar a máscara sobre o rosto do paciente e passar a cinta elástica por trás da cabeça até o pescoço, puxar as pontas da cinta elástica, até a máscara encostar e se ajustar à face do paciente;
- 7- Durante o tratamento, verifique periodicamente o volume da solução medicamentosa no frasco..

Atenção: Verifique se todas as conexões estão bem conectadas.

Princípio de Funcionamento

Através de atomização que nebuliza uma solução medicamentosa, contida no recipiente e que é arrastada pelo fluxo gasoso de Oxigênio ou Ar comprimido medicinal, com auxílio de uma máscara de PVC atóxico, ao sistema respiratório do paciente.

Limpeza, Desinfecção, Esterilização e Manutenção Preventiva

O micronebulizador é artigo semicrítico e como tal, deve passar por procedimento de desinfecção antes do uso. Para isso:

- 1-Desmonte o produto, separe suas partes e remova qualquer resíduo existente;
- 2-Prepare solução de Hipoclorito de Sódio 1% de acordo com as instruções do fabricante;
- 3-Imergir totalmente as partes do produto na solução por um período de 30 minutos ou conforme instruções do fabricante;
- 4-Usando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar;
- 5-Monte o produto e acondicione-o de modo a ficar protegido contra contaminação até sua utilização.

Nota: A solução indicada pode ser substituída por solução germicida encontrada em farmácias. Neste caso siga as orientações do fabricante da solução germicida.

Observações:

- Utilize somente peças de reposição original RWR. A utilização de peças não originais poderá comprometer o desempenho do equipamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), através deste termo de garantia, assegura, como fabricante, ao comprador/consumidor do produto o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, decorrentes de defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo de 90 dias, contados a partir da entrega efetiva do produto ao primeiro consumidor. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3º do Art. 26 da Lei 8.078/90.

Limita-se a responsabilidade da RWR em substituir as peças defeituosas do aparelho, desde que seu técnico credenciado constate falha em condições normais de uso.

A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, por uso em desacordo com o manual de instruções, ou, ainda, no caso de ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas.

Obriga-se a RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, a prestar os serviços, tanto os gratuitos quanto os remunerados, exclusivamente nas localidades para efetuar consertos. O comprador-consumidor residente em outra localidade será, pois, o único responsável pela despesa de transporte, ida e volta do aparelho à assistência técnica mais próxima.

Se o aparelho for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuamente em vigor até a expiração de seu prazo contando da data da aquisição pelo primeiro comprador-consumidor.

A presente garantia somente será válida se devidamente preenchida pela RWR ou pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho, e não apresentar rasuras ou modificações. É necessário ainda, que este certificado seja apresentado juntamente com a nota fiscal a cada solicitação de prestação de serviços de conserto.

Fabricado e Distribuído no Brasil por:

RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda
Av. do Taboão 3417 - Vila Santa Luzia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09656-000
Tel.: +55 11 3465-5400
E-mail: rwr@rwr.com.br
CNPJ: 08.441.496.0001-40

Responsável técnico: Gerson Potonyacz - CREA 5063101610
Prazo de validade: Indeterminado
Registro na ANVISA nº: 80412230025

TERMO DE GARANTIA (Deve ser preenchido pelo revendedor no ato da entrega)		
RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda.		
Revendedor _____		
Modelo e nº de fabricação _____		
Nota Fiscal nº _____		
Adquirido por _____		
End: _____	Nº _____	
Cidade _____	Est. _____	Cep: _____