

INTRUÇÕES DE USO

TRAQUÉIAS RWR

Nome Técnico: Outras Partes, Peças e Acessórios

Nome Comercial: Traquéias RWR

Descrição Geral

As Traquéias RWR são acessórios para uso médico- hospitalar, projetados para aliar tecnologia e facilidade de manuseio. Para uso em geral, desempenham basicamente a mesma função de condutores de gases. Produtos condutores de gases, são utilizados como condutores de diversos tipos de gases em várias situações médico-hospitalares.

Fácil manuseio e assepsia.

Fabricados de acordo com as normas ABNT.

Uso indicado apenas para profissionais qualificados.

Características / Composição:

Conexões compatíveis com os padrões utilizados no mercado (norma NBR13475).

Traquéias: confeccionadas em silicone atóxico.

Embalagem:

As traquéias RWR são embaladas individualmente em embalagem plástica e seladas a quente.

Modelos:



Foto ilustrativa dos produtos

Descrição dos Produtos

Código	Descrição
00.0039	Alongamento Ø 12x200mm
00.0040	Traquéia de Ø 22x750mm
00.0043	Traquéia de Ø 12x750mm
00.0095	Traquéia de Ø 22x1200mm
00.0096	Traquéia de Ø 22x1000mm
00.0168	Traquéia de Ø 22x600mm
00.0206	Traquéia de Ø 12x1200mm
00.0207	Traquéia de Ø 12x1000mm
00.0208	Traquéia de Ø 12x600mm
00.0209	Traquéia de Ø 12x450mm
00.0210	Traquéia de Ø 12x300mm
00.0212	Traquéia de Ø 22x450mm
00.0213	Traquéia de Ø 22x300mm
00.0224	Alongamento Ø 12x100mm
00.0256	Traquéia de Ø 22x150mm
00.0264	Alongamento Ø 12x150mm
00.0281	Traquéia de Ø 22x1500mm
00.0314	Traquéia de Ø 22x2000mm
00.0333	Traquéia de Ø 22x200mm
00.0467	Traquéia de silicone Ø 22 x 1800 mm
00.0519	Traquéia de silicone Ø 12 x 1600 mm
00.0520	Traquéia de silicone Ø 22 x 1600 mm
00.0604	Traquéia de silicone Ø 12 x 1500 mm
00.0628	Traquéia de silicone Ø 12 x 3000 mm
00.0671	Traquéia de silicone Ø 22 x 1000 mm

1

Indicação

As traquéias de silicone são acessórios utilizados como condutores de diversos tipos de gases em várias situações médico-hospitalares.

Destinam-se a conduzir o gás em diferentes procedimentos hospitalares.

As principais áreas de aplicação do produto são: anestesia inalatória, inalação, ventilação do paciente, terapia respiratória e emergências.

As traquéias foram desenvolvidas para atender as necessidades de transferência de gás para o paciente, utilizadas para acoplar em aparelhos de anestesia, ventiladores, macronebulizadores, filtros de calsoada e etc.

Armazenamento e transporte

Durante o armazenamento e transporte proceda da seguinte forma:

- Local seco, fresco e ventilado; não o deixe exposto diretamente à luz do sol.
- Não exponha o produto a temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), conserve-o em temperatura ambiente.

Instruções de Uso

Conecte o acessório a ser utilizado no equipamento seguindo as instruções do fabricante do equipamento.

Siga o procedimento médico normalmente.

Precauções:

- Para desconectar a traquéia puxe pelo bocal das traquéias;
- Não utilize as traquéias sem prévio conhecimento ou supervisão adequada;
- Não utilize as traquéias se encontrado vazamento;
- Certifique-se a traquéia é adequada e que está conectada corretamente;
- Após o uso, proceda a limpeza e a esterilização antes de reutilizá-la;
- Só utilize este produto em perfeitas condições, qualquer anormalidade contatar o serviço de assistência técnica RWR;
- Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a indicada pela RWR;
- A não observância destas precauções será considerado mau uso do produto;
- Armazene o produto em local arejado e ao abrigo do calor e umidade;
- As traquéias não são fornecidas esterilizadas, portanto elas devem ser esterilizadas antes de seu uso.

Princípio de Funcionamento

O gás é conduzido até o paciente passando pelo interior do produto, chegando ao mesmo de forma invasiva ou não invasiva.

Limpeza, Desinfecção, Esterilização e Manutenção Preventiva

Os produtos não são fornecidos esterilizados, portanto eles devem ser esterilizados antes de seu uso.

Esterilização a vapor:

- Desmonte o produto e limpe-o;
- Embale todas as peças e esterilize separadamente;
- Utilize a temperatura de 121°C por 15 minutos ou 134°C por 4 minutos para a esterilização;
- Não colocar as peças sem embalagem adequada dentro da câmara;
- Não encostar as peças na parede da câmara;
- Não colocar as peças uma sobre a outra, pois as mesmas deformarão.

Cuidados Gerais

Uso indicado apenas por profissionais qualificados em ambiente hospitalar.

Utilize apenas produtos originais RWR.

Estabeleça uma rotina de limpeza e esterilização para os produtos que entram em contato direto com o paciente.

Verifique o perfeito estado de conservação dos produtos, componentes de desgaste normal, que deverão ser trocados periodicamente.

Realizar teste de vazamento antes da utilização.

Advertências e Precauções

- Não utilize o produto sem prévio conhecimento ou supervisão adequada;
- Não utilize o produto se constatado vazamento. Para verificar, pressurize o produto e utilizando água e sabão neutro verifique se não ocorrem bolhas, ou pressurize o produto e utilizando um manômetro de cm H₂O verifique se a pressão não diminui;
- Certifique-se de que o produto é o adequado e que está conectado corretamente;
- Nunca use óleo, graxa, hidróxido ou deixe materiais orgânicos similares em contato com o produto;

2

- Após uso, proceda a limpeza e a esterilização antes de reutilizá-lo;
- Não utilize o produto caso haja fissuras ou rachaduras;
- Só utilize o produto em perfeitas condições. Qualquer anormalidade contatar imediatamente o serviço de assistência técnica RWR;
- Não utilize o produto para qualquer outra função que não a indicada pela RWR;
- A não observância destas precauções será considerada como um mau uso do produto;
- Armazene o produto em local arejado e ao abrigo de calor e umidade;
- Não utilize os componentes se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Atenção

Para sua maior segurança, não instale ou opere o equipamento sem antes ler atentamente as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, consulte a assistência técnica da RWR.

Este equipamento só deve ser operado por pessoas devidamente treinadas.

A não observância das regras de segurança poderá causar danos materiais e humanos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao comprador-consumidor do aparelho, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação, apresentado no prazo de 1 ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da RWR em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constante falha em condições normais de uso.

A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, por uso em desacordo com o manual de instruções, ou, ainda, no caso de ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas.

Obriga-se a RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, a prestar os serviços, tanto os gratuitos quanto os remunerados, exclusivamente nas localidades para efetuar consertos. O comprador-consumidor residente em outra localidade será, pois, o único responsável pela despesa de transporte, ida e volta do aparelho à assistência técnica mais próxima.

Se o aparelho for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuamente em vigor até a expiração de seu prazo contando da data da aquisição pelo primeiro comprador-consumidor.

A presente garantia somente será válida se devidamente preenchida pela RWR ou pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho, e não apresentar rasuras ou modificações. É necessário ainda, que este certificado seja apresentado juntamente com a nota fiscal a cada solicitação de prestação de serviços de conserto.

TERMO DE GARANTIA		
(Deve ser preenchido pelo revendedor no ato da entrega)		
RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda.		
Revendedor	_____	
Modelo e nº de fabricação	_____	
Nota Fiscal nº	_____	
Adquirido por	_____	
End:	_____ Nº _____	
Cidade	Est.	Cep: _____

Fabricado e Distribuído no Brasil por:

RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda
 Av. do Taboão 3417 - Vila Santa Luzia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09656-000
 Tel.: +55 11 3465-5400
 E-mail: rwr@rwr.com.br
 CNPJ: 08.441.496.0001-40

Responsável técnico: Gerson Potonyacz – CREA 5063101610
 Prazo de validade: Indeterminado
 REGISTRO ANVISA Nº: 80412230002

Produto não estéril